



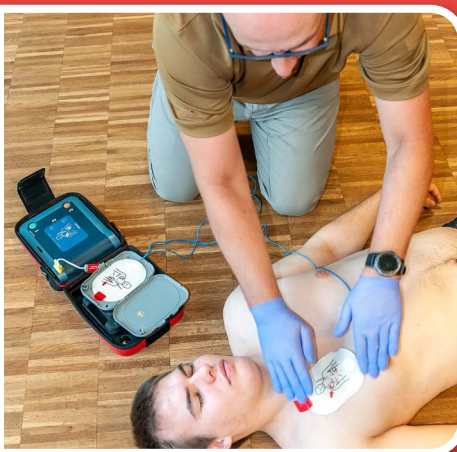

Po przyniesieniu urządzenia otwórz czerwony pokrowiec i połóż urządzenie na ziemi.

Odszukaj zielony przycisk i naciskaj go tak długo, aż zapali się zielona dioda, a urządzenie komunikatem głosowym poinformuje, że jest sprawne i gotowe do użycia.

Zobaczysz dwie elektrody.

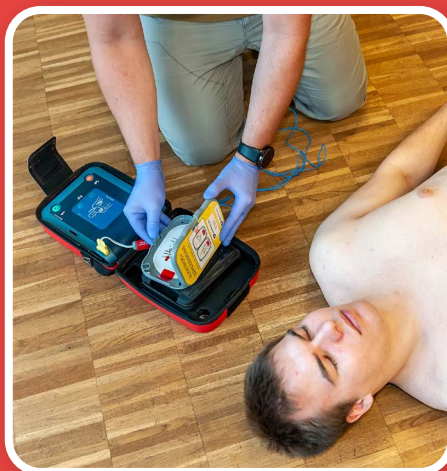

Przyklej elektrody do gołej i suchej skóry na klatce piersiowej poszkodowanego.

Elektrody musisz przykleić dokładnie.


Przyklej obie elektrody pionowo do osi ciała poszkodowanego.

W ten sposób zapewnisz skuteczniejszy przepływ prądu przez mięsień sercowy.



Do momentu przyklejenia elektrod kontynuuj prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Nie dotykać poszkodowanego!

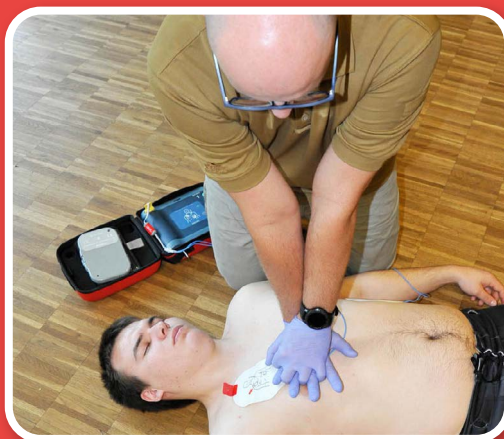

Po ocenie rytmu serca AED samo rozpoznaje potrzebę defibrylacji. Automatycznie rozpoczyna ładowanie urządzenia, informując tym głośnym sygnałem dźwiękowym. W tym czasie prowadź uciski klatki piersiowej, tak jak przy resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Uwaga, defibrylacja!

Naciśnij czerwony przycisk i poczekaj, aż urządzenie potwierdzi wykonanie defibrylacji.

Rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową.



UMED dla serca
akcja AEDukacyjna